

SISTEMA FIXADOR DE TUBOS E CATÉTERES



Descrição

Dispositivos não estéreis para fixação e alívio de tensão de tubos e cateteres, tecido não tecido de fibra 100% poliéster revestida com adesivo de cola quente.

Algumas versões possuem tira fixadora de velcro (nylon) revestida com adesivo de cola quente.

As tiras de fixação de velcro podem ser abertas e fechadas sempre que necessário, permitindo que os

dispositivos permaneçam aderidos à superfície da pele do paciente por alguns dias, não sendo necessário a troca dos mesmos diariamente.

Apresentação comercial

EMBALAGEM PRIMÁRIA:

envelope de papel grau cirúrgico.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA:

caixa cartonada constituída por papel-cartão

MODELOS	TAMANHOS	CORES
LM0035	6 x 9cm	BEGE

Composição

Poliuretano

Indicações

Indicado para fixação externa e alívio de tensão de tubos na pele, como por exemplo, tubos endotraqueais orais e nasais, alívio de tensão de drenos de Redon, drenos de feridas cirúrgicas, sondas de medição da tensão, infusões, vários tipos de tubos e cateteres CVC/DPCA/PEG/torneiras, tubos de lúmens grandes e drenos torácicos.

Contra-indicação

Não há contraindicações conhecidas para esse produto.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- a. PRECAUÇÕES:** O produto não se destina para uso em cavidades internas do corpo. Se houver desenvolvimento de infecção durante o uso do curativo, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável.
- b. RESTRIÇÕES:** Não se aplica.
- c. ADVERTÊNCIAS:** Produto não estéril. Suspender o uso em caso de reação alérgica.

d. CUIDADOS ESPECIAIS E


ESCLARECIMENTOS: Não utilizar se a embalagem estiver aberta, rasgada, perfurada ou molhada. Quando utilizado em feridas infectadas, a infecção deve ser supervisionada e tratada de acordo com o protocolo clínico aplicável. Se o curativo não sair facilmente, umedecer com soro e retirar.

e. ARMAZENAMENTO: O produto deve ser mantido em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

f. TRANSPORTE: O produto não é afetado pelo transporte desde que o mesmo seja transportado por empresa regularizada para esta atividade, nas condições de temperatura ambiente.

Instruções de utilização

Limpar e secar a pele. Remover o papel de proteção. Colar o suporte de fixação. Inserir o tubo de modo apropriado e conforme as instruções de cada conjunto. Fechar as faixas de velcro, quando houver. Pressionar ligeiramente.

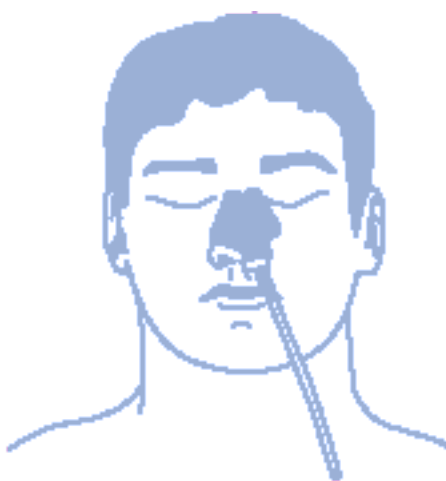

Condições de armazenamento

Mantenha longe da luz e calor. Armazenar a temperatura ambiente. Evite qualquer choque térmico.

Prazo de validade

Prazo de validade de 5 anos, quando o produto é mantido em sua embalagem original intacta, e seguidas as condições de armazenamento.

Registro ANVISA

82307460018

Importadora e Distribuidora

Lismed Comércio Importação e Exportação Ltda
Rua da Paz, 1601, Sala 1001 – Chácara Santo Antonio
São Paulo / SP | CEP: 04713-002
Tel: (11) 3862-0313 | E-mail: sac@lismed.com.br
CNPJ: 40.678.514/0001-15

Fabricante

Pharmaplast S.A.E | Amria, Free
Zone 23512, Alexandria, Egito

Resp. Técnico

Tatiane Cristina Biajante
CRF/SP 40837

